



BG Group Srl
Sede legale: Via S.Michele, 175 – 21042 Caronno P.Illa VA
Showroom – Via Varese 215 – 20033 Solaro MI
Tel.371-4404760 - e-mail: info@bggroup.it
www.bggroup.it
PI 03339110128 SDI W7YVJK9

MASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE



Codice: **BGMK**

Strati esterni: 100% cotone certificato OEKOTEX® 115g/mq

Strati interni: 3 strati TNT SMS 40g/mq

- **Usò medico tipo I** secondo UNI EN ISO 14683 e UNI EN ISO 10993
- Efficienza di filtrazione batterica (BFE) > 95% (tipo I)
- Resistenza alla respirazione inferiore 40
- Bioburden (pulizia microbiologica) conforme
- Bio compatibilità (citossicità, irritazione e sensibilizzazione cutanea o valutazione bibliografica) conforme
- Prodotto e confezionato in Italia (**100% made in Italy**)
- Fornita **sanificata**
- Lavabile a mano in acqua tiepida (**30 lavaggi**)
- **Regolabile** con cordini o elastici
- **3 taglie:** Large (20x10cm) – Medium (18x9cm) – Small (16x8cm)
- **Packaging:** sacchetto politene con zip a pressione

ECOMASCHERINA CHIRURGICA LAVABILE 
DOPPIA OPZIONE: ELASTICI e CORDINI

Taglia LARGE
20x10 cm



1 = 30
30 lavaggi



- ^ **Utilizzo con elastici o cordini regolabili dietro la nuca o dietro le orecchie**
- ^ **Portabilità nel rispetto della tutela igienica:** in uso su naso e bocca e in pausa su collo (senza doverla appoggiarla in un ambiente non protetto)
- ^ **Busta portamascherina** con zip a pressione riutilizzabile
- ^ **Forma a soffietto** che permette una corretta vestibilità

USO MEDICO - Sanificata con trattamento a raggi gamma
 Strati esterni: doppio strato di tessuto **100% COTONE**  115 g/mq
 Strato interno: **TNT SMS** filtrante 40 g/mq



Attenzione, consultare le seguenti istruzioni e conservarle per consultazioni future.

Istruzioni per l'uso: Lavarsi accuratamente le mani con sapone o soluzione alcolica prima di indossarla. Per indossare la mascherina, con l'opzione "cordini", è sufficiente trovare la giusta misura legando con un'asola dietro al collo i due laccetti laterali bassi e gli altri due laccetti dietro la nuca oppure legando i due laccetti di ogni lato tra di loro dietro le orecchie. Se si preferisce l'opzione "elastici" bisogna procedere a tagliare i 4 cordini a filo mascherina. **E' importante che la mascherina sia ben avvolgente per poterne garantire il corretto funzionamento** e si può regolare aprendola bene grazie alla sua forma a soffietto.

Uso: La mascherina è da intendersi **ad uso personale**. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità della mascherina e provocano una perdita. Non modificare in nessun modo questo dispositivo e se si dovesse danneggiare sostituirlo. Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute. Tenere lontano dalla portata dei bambini. **Assicurarsi che non venga utilizzata per scopo diverso da quello per il quale è stata realizzata.**



Non utilizzare se la confezione è danneggiata. Non usare in attività con rischio da impigliamento/afferramento. **Valutazione dei rischi disponibile sul nostro sito.**

Istruzioni di stoccaggio: Conservare in un luogo asciutto senza esposizione diretta alla luce del sole, nella sua confezione d'origine.



Istruzioni di pulizia e di manutenzione: Lavare dopo ogni utilizzo. Lavare in **acqua tiepida** utilizzando un **prodotto igienizzante**. Sciogliere le asole prima del lavaggio. La mascherina contiene tessuto TNT che **non sopporta la stiratura**. Assicurarsi che la mascherina sia completamente asciutta prima del suo utilizzo. Non asciugare in asciugatrice. A fine utilizzo gettare nell'indifferenziata.



Direttiva 93/42/CEE- UNI EN 14683 uso medico tipo I



Distribuito da:
 BG Group Srl
 Via San Michele 175
 Caronno Pertusella(VA)



BGMK25

100% made in Italy



LOT 01-20

info@bggroup.it
 www.bggroup.it